


## Jak respirátor nasadit?

1. Rozbalte respirátor tažením horního a spodního panelu oběma rukama, aby vznikl mušlový tvar.
2. Nasadte si masku na obličej tak, aby zakrývala ústa a nos. Pásky přetáhněte za uši, tak aby Vám maska dobře držela na obličeji.
3. Přitiskněte a upravte masku k obličeji tak, aby byla zajištěna těsnost.
4. Rouška je správně a pevně připevněna, pokud cítíte silný odpor proti výdechu a stěny masky se tisknou pryč od obličeje.

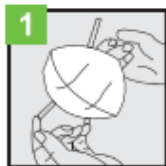

## Podmínky skladování

Skladujte při pokojové teplotě

Vyvarujte se nadměrné teploty a vlhkosti

## Záruka

2 roky od data výroby

a odolnými pásky.

## Popis

Neuvolňuje částice a je odolný vůči vlhkosti z proudu dýchacího vzduchu.

Bez latexu, skleněných vláken a toxických nebo dráždivých látek.

Upevňovací systém s elastickými